

SalivaChecker®

サリバチェッカー

だ液を採取、ポストへ投函。

6 種のがんリスクを評価。
膵がんも早期ステージから

累計受検者数
11 万人突破

医療機関導入
1,700 以上

XTC JAPAN 2025
優勝

口腔がん

肺がん

乳がん

胃がん

膵がん

大腸がん

だ液を採取、ポストに投函 **かんたん** 3 ステップ

1 だ液を採取

2 ポストへ投函

3 検査結果

検査手順のご紹介

だ液だけで手軽に検査

専用キットを使って簡単にだ液を採取。5分程度で終了します。忙しい方でも手軽に検査を受けられます。

体への負担なく検査可能


少量のだ液を採取するだけなので、体への負担がありません。血液検査など痛みが苦手な方でも安心して受けられます。

「今のリスク」が分かるレポート

遺伝子検査のような生涯的可能性ではなく「検査時点でのがんのリスク」についてグラフやチャートでレポートします。

がんは待ってくれない **がんの進行スピード例**

がんは進行すると成長が速くなるため、早期発見が極めて重要です。そのため、生活習慣の改善や検診の活用を通じて、がん化するリスクがある段階から適切に管理することが大切です。

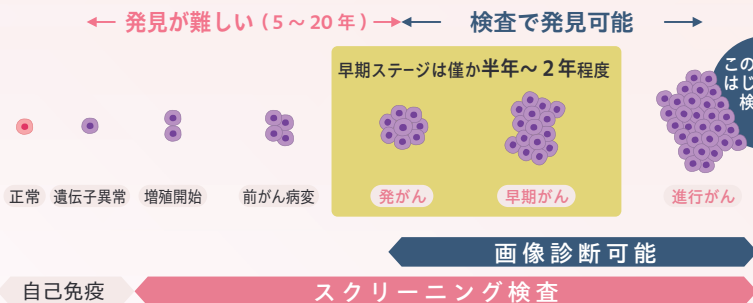

がんは**早期発見**が大切

SalivaChecker® とは

Q どうしてリスクがわかるの?

SalivaTech 会社説明動画

須賀川商工会議所会員限定特別価格のご案内

① 通常価格

公式サイトでお申し込みの場合 ~~26,400~~ 円(税込)

② 当所会員 特別価格

特別価格 1名につき **17,000** 円(税込)

さらにお得に!

③ 当所会員 且つ 当所生命共済加入の場合

当所会員で生命共済制度加入事業所の場合は、須賀川商工会議所が負担することにより

14,000 円(税込)

でご提供いたします。

サリバチェッカー 検査の流れ

内容物


！ 検査キットのキャップは、だ液採取前に閉めないでください



検査前日・当日の準備

前日

翌日のだ液採取までの12時間の間は、水以外の飲食、薬の服用はしないでください

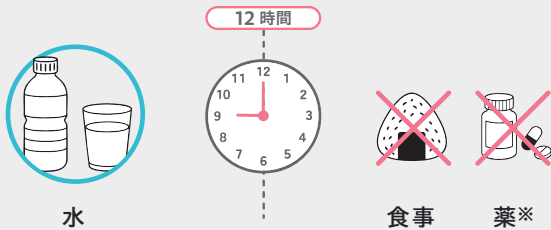

※ 採取前12時間以内に薬の服用が必要な方は、事前に医師等にご相談ください

当日

- 体調が悪い（風邪・発熱・炎症等）場合は、回復してから採取しましょう
- 午前中の採取をお願いします

起床後

- 採取1時間前までに、歯みがきを済ませてください
- 出血をともなうような歯の手入れや、入れ歯安定剤の使用は控えてください
- 朝食、服薬は控えてください

採取1時間前

以下も控えてください

× 激しい運動 × 喫煙 × うがい薬

採取15分前


コップ半分程度のお水を飲んでいただくか、軽くお口をゆすいでおくことでだ液がでやすくなります



検査手順

採取手順は動画でもご確認ください。

<https://www.salivachecker.com/collectmovie/>

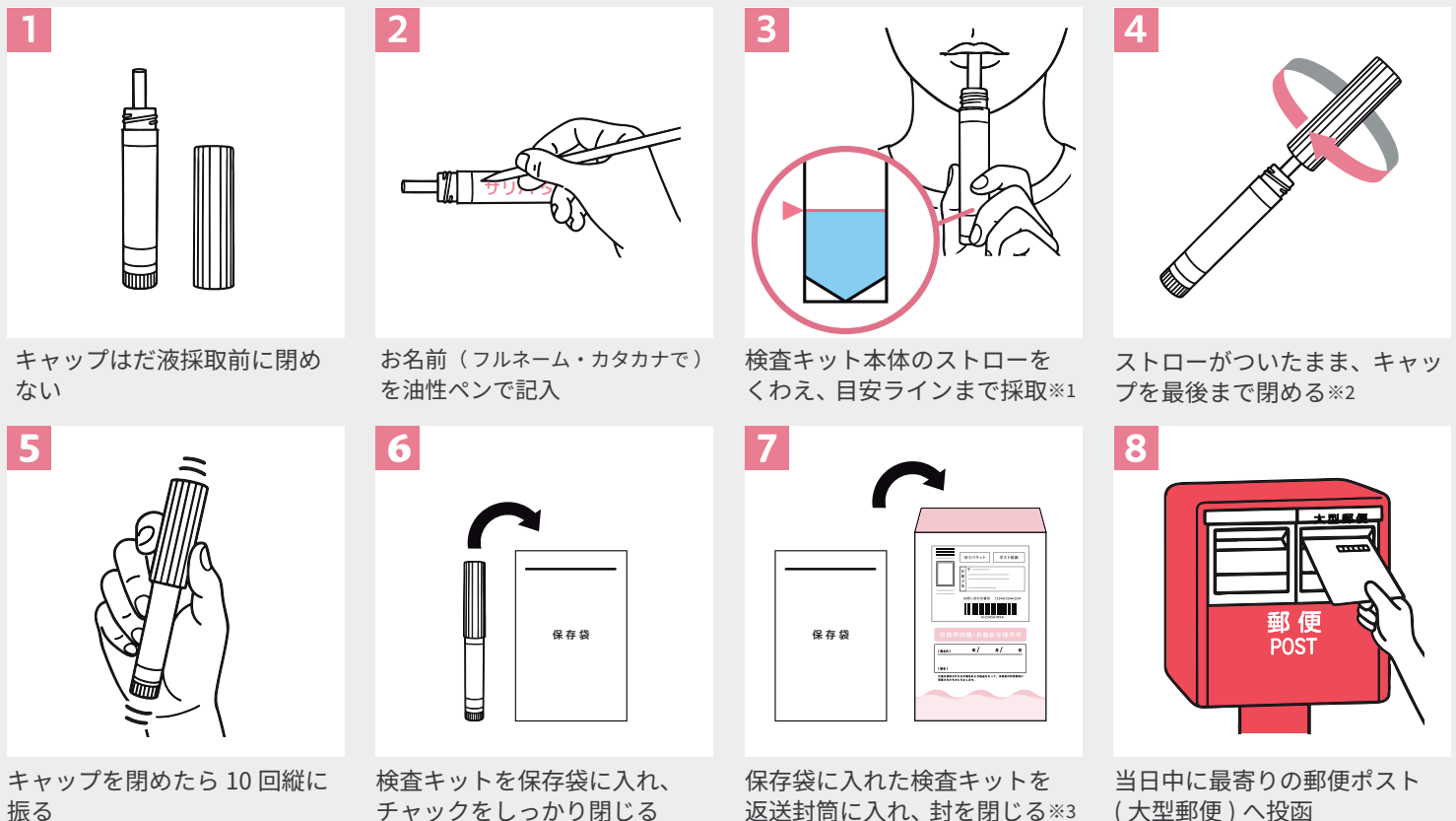

※1：だ液以外のものを入れない、だ液は少なくとも多くてもNG
※2：一度閉めたキャップは開けない
※3：封筒裏面のチェック項目を確かめ、封筒表面の署名欄に記入

「サリバチェッカー」購入申込書


お申し込み後
の流れ



会員様
(構成員 or ご家族)



須賀川商工会議所

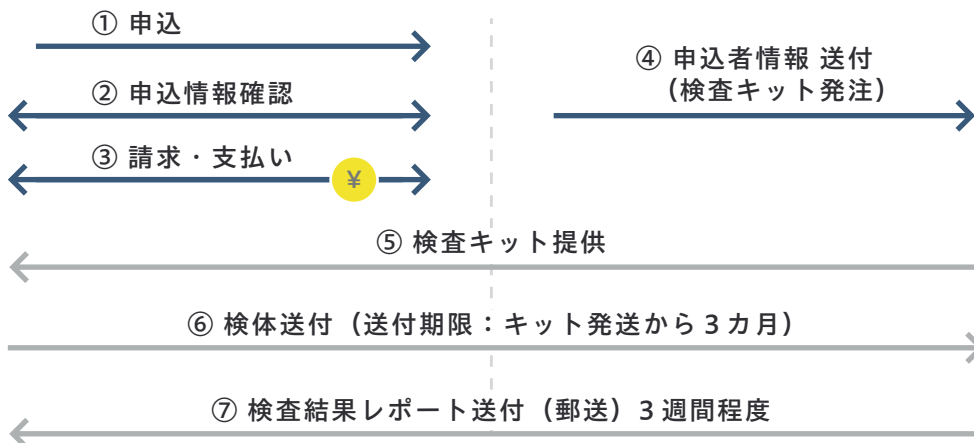

「サリバチェッカー」購入申込書

須賀川商工会議所 行

下記に必要事項を記入し、FAX (0248-76-2127) にて送信ください。
使用者の情報はお申し込み後、改めて伺います。

※全て必須項目です。漏れのないようご記入ください。

| | |
|-------------|----------|
| 申 込 日 | 令和 年 月 日 |
| 事業所名 | |
| 住 所 | 〒 |
| ご 担 当 者 名 | |
| 電 話 番 号 | () ー |
| E - m a i l | @ |
| 申 込 者 数 | 名 |

- ※ 検査キットの郵送先は職場・個人宅がそれぞれ選択できます。
- ※ お申し込み人数確定後、当所より請求書を送付いたします。(ご入金後検査キット発注)
- ※ 発注後のキャンセルは承ることが出来ませんのでご了承ください。

お 問 い 合 わ せ

須賀川商工会議所
TEL: 0248-76-2124

当所生命共済(定期保険団体型)およびアクサ生命保険株式会社(以下「アクサ生命」)の保険契約の加入を条件とした追加割引適用の可否確認のために、当所からアクサ生命に、申込書に記載の個人情報を開示し、アクサ生命から加入状況情報の提供を受けます。これについて、本申込書の提出を以て同意いただいたものとします。